



## ИНСТРУКЦИЯ

### экспресс-тест на ВИЧ-1/2 антитела OraQuick Rapid HIV - 1/2 Antibody Test для выявления ВИЧ-антител по в организме человека по слюне

Только для in vitro диагностики

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Тест OraQuick – это тест для in vitro домашней диагностики ВИЧ (ВИЧ 1 и ВИЧ 2) по слюне. Этот тест показывает наличие в вашем организме антител к ВИЧ. Положительный результат является предварительным и необходимо подтверждающее тестирование.

#### ВАЖНО:

- Пожалуйста, следуйте инструкции неукоснительно для того, чтобы результат теста был правильным.
- Вам должно быть больше 17 лет для того, чтобы использовать этот тест.
- Положительный результат теста не означает, что вы точно инфицированы ВИЧ, а скорее что необходимо пройти дополнительное тестирование в медицинском учреждении.
- Отрицательный результат теста при условии, что вы совершаете действия, которые ставят вас под угрозу заражения ВИЧ постоянно, вы должны делать тест на ВИЧ регулярно.
- Данный тест не может быть использован для принятия решений, так как это может привести к повышению риска заражения ВИЧ.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Большинство людей, беря тест на ВИЧ, чувствует беспокойство. Но, если Вы чувствуете беспокойство, беря тест, вы можете подождать, пока не успокоитесь, или пройти тестирование у вашего доктора или в местной клинике.
- Удостоверьтесь, что место, где вы будете использовать тест, хорошо освещено.
- Если вы ВИЧ - положительны, или находитесь на лечении или на профилактическом лечении от ВИЧ, этот тест вам не подходит.
- Если вы участвовали в клиническом испытании вакцины против ВИЧ, то можете получить положительный результат теста, но это не означает, что вы заражены ВИЧ. Вы должны проконсультироваться с исследовательской группой.
- Если печать на упаковке теста была сломана или если какое-либо содержание пакета отсутствует, сломано, или было открыто, не используйте этот тест.
- Срок годности, напечатанный на коробке, просрочен, не используйте этот тест.

- Не открывайте пакеты, пока вы не будете готовы начать тестирование.
- Не ешьте, не пейте и не используйте средства по уходу за ротовой полостью (такие как жидкость для полоскания рта, зубная паста или полоски для отбеливания) минимум за 30 минут до начала тестирования.
- Удалите предметы из ротовой полости, такие как зубные протезы или любые другие средства, которые закрывают зубы и десна.
- Не используйте тест, если он был подвергнут воздействию домашних чистящих средств.
- Не используйте этот тест, если он хранился вне приемлемой температуры в 2°-27°С.

#### СОСТАВ НАБОРА:

- Пакет, содержащий устройство для проведения теста, которое может быть использовано только один раз
- Пакет, содержащий пробирку, наполненный 1 мл жидкости
- Инструкция.

#### МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:

- Таймер, часы и все, что вы можете использовать для измерения времени в 20 - 40 минут.
- Очки, если вы носите очки для чтения, вам они необходимы для прочтения результата.

#### СБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА:

Не позволяйте другому человеку прикасаться к тест-набору и тестовому устройству. Проведите тестовым устройством (пористой мембраной) по наружной поверхности верхней и нижней десны. НЕ МОЙТЕ РОТ ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ!

#### ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ:

- Откройте пробирку с буфером и поставьте на горизонтальную поверхность. Опустите тестовое устройство полностью в пробирку с буфером. Удостоверьтесь, что мембрана касается дна пробирки. Окошко для результатов должно быть повернуто к вам.
- Через 20 минут начнет проявляться полоска или полоски в окошке для результатов. Интерпретировать результаты можно за время от 20 до 40 минут.

#### ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Отрицательный:

Цветная линия проявляется только в зоне «С». Это означает, что ВИЧ-антитела не выявлены.

Положительный:

Проявляются цветные полоски в зонах «С» и «Т». Это означает, что ВИЧ-антитела обнаружены и вам необходимо обратиться к врачу за подтверждающим анализом.


Ошибка тестирования:

Проявляется цветная линия только в зоне «Т» или цветные линии вообще не проявляются. Это означает, что необходимо повторить тест с другим набором.

Чаще всего ошибка тестирования связана с недостаточным внимательным соблюдением инструкции.

Бесплатная горячая линия по вопросам профилактики и лечения ВИЧ/СПИД:

**8-800-505-65-43**

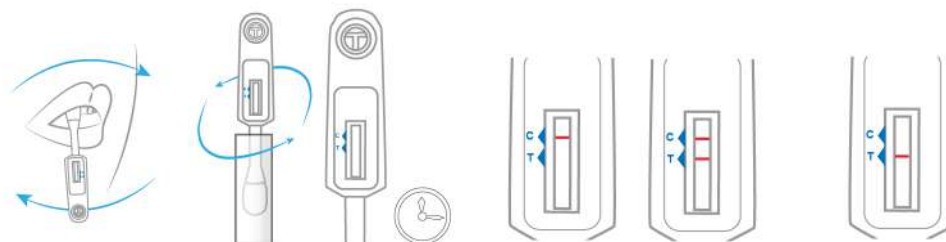

Проведите пористой мембраной по наружной поверхности нижней и верхней десен.

Опустите в пробирку с буфером, помешайте, оставьте на 20 минут.

Отрицательный результат (ВИЧ-антитела не выявлены)

Положительный результат (ВИЧ-антитела выявлены)

Ошибка тестирования (повторите тестирование)

По всем вопросам касающимся экспресс-теста «OraQuick ADVANCE», следует обращаться в ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА», г. Москва, Ленинский проспект, д. 88 корп. 3. офис 100  
Тел./факс (499)138-00-79, (499)138-16-44, (499)138-19-91 e-mail: med@progbio.ru www.progbio.ru  
Также приобрести тесты можно через Интернет-магазин www.domtest.su e-mail: info@domtest.su тел. (495)723-24-66

#### МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ:



Экспресс-тест на выявление гепатита С по слюне



Экспресс-тест на выявление гепатита В



Экспресс-тест на выявление язвы желудка